

どんな状況でも、曇らない。

フィルムの透明度と平滑度、そして高度な防曇効果。
すべてに世界最高レベルのクオリティを実現。

MeGUARD

HIGH QUALITY FACE GUARD IN THE MEDICAL FIELD

手術の現場における飛血・飛液から顔面を守り、感染などを防ぐ高品質フェイスガード。

今までになかったハネ上げ式、常時着用でいつでもON・OFF切替使用。

カチューシャのように常に身につけられます。

新技術により、常にクリアな視界をキープ。手術用フェイスガード【ミーガード】

フィルム交換式

使い捨てタイプだから、いつも清潔・快適な使い心地をお約束します。

はね上げ可能

フィルムが邪魔なとき、上にはねあげることができます。

眼鏡との併用可能

カチューシャ式なので
眼鏡をかけた状態でも可能で
鼻への負担もありません。

かんたん交換

フィルムの着脱はとても簡単で、
調節もラクに行えます。

ミーガード 本体


ガンメタリック
MEG-1-GM
ブルー
MEG-1-B
ライトブルー
MEG-1-LB
プリズムラベンダー
MEG-1-PL
ピンク
MEG-1-P
レッド
MEG-1-R
オレンジ
MEG-1-O



イエロー
MEG-1-Y
グリーン
MEG-1-G
フレッシュグリーン
MEG-1-FG
ライトグリーン
MEG-1-LG
シルバーグレー
MEG-1-SG
シャンパンゴールド
MEG-1-CG
サクラ
MEG-1-S

○カラー14色 ○価格(1本)/1,600円(税別)

フィルムL / フルフェイス

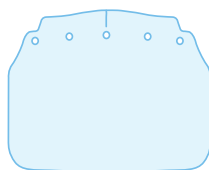


MEG-1F(L)

○寸法/
W248mm×H209mm×T0.13mm
○1パック10枚入り
○価格/3,200円(税別)



(装着イメージ)

フィルムM / ハーフフェイス

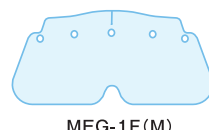

MEG-1F(M)

○寸法/
W247mm×H123mm×T0.13mm
○1パック10枚入り
○価格/2,000円(税別)



(装着イメージ)




MITAS
Medical Instruments, Technologies, And Services

MeGUARD

ミーガード 取扱説明書


本製品は微小な粉塵や水滴程度の液体の飛沫などから、できるだけ眼、顔を保護することを目的としています。※本製品は使用者の眼、身体の損傷を防ぐことを保証するものではありません。

ミーガードフレームに専用フィルムを装着して、ご利用ください。

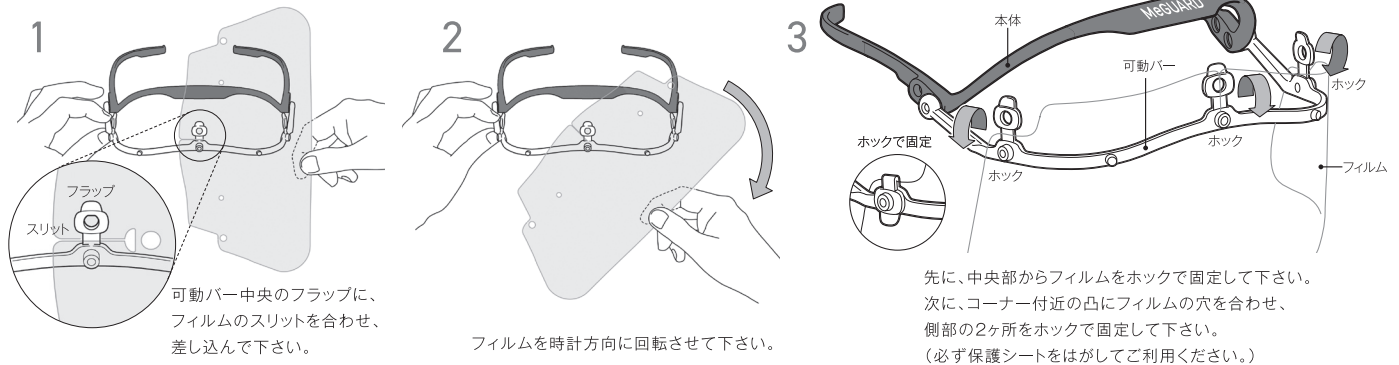

可動バーの位置を調整できます。

- ◎ミーガードフレームは本体側の穴と、可動バー側のピンによって連結されています。
- ◎取り外しは、双方の連結部の元を持ってゆっくり引き離してください。
- ◎取り付けは、本体の左右にある穴から使いやすい位置を選び、可動バーのピンを本体の穴にまっすぐに押し込んでください。
- ◎注意：取り付けは、必ず左右の穴の位置を合わせてください。

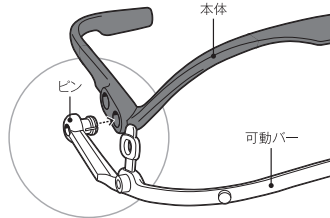

正しく装着してご利用ください。額の上部をおさえるように、装着してください。

- ◎ミーガードフレームの前部分を、額の上部を抑えるようにして、装着してください。
- ◎フィルムが不必要なときは、上にはねあげることができます。



⚠ 使用上の注意

- ①防曇フィルム(MEG-1F)には片面に保護シートが貼られています。フレームに取り付ける際には保護シートが貼られた状態のまま装着して下さい。また、必ず保護シートを取り外してご使用下さい。
- ※このフィルムは使い捨てです。汚れたフィルムや複数回の使用を避け、毎回新しいものにお取り替え下さい。
- ②ご使用者による改造、修理は行わないで下さい。

⚠ 取扱上の注意

- ①フレームクリーニングは、ぬるま湯に薄めた中性洗剤で手洗いし、水洗いの後に柔らかい布、あるいは柔らかい紙でふき取って下さい。
- ②フレームの消毒には、無水エタノール、又は、次亜塩素酸ナトリウムを6%程度に薄めた溶液をご使用下さい。ガス、熱(煮沸)、及び有機溶剤等、不適合な薬品の使用は、製品の劣化、破損の原因となりますので使用しないで下さい。

⚠ 本製品は滅菌されていません。

フレームの製品環境安全情報

- 【有害性情報】本製品は通常の取り扱い方法(本来の使用状態)に於いて、健康に害を及ぼすことはありません。
- 【発火温度】ミーガードフレーム 約500℃ 可動バー 約470℃
- 【廃棄上の注意】廃掃法及び地方自治体の条例に従い廃棄して下さい。焼却処分する場合は、廃掃法、大気汚染防止法、水質汚染防止法に従って処理して下さい。
- 【保管上の注意】直射日光を避け、推奨(気温15℃～20℃、湿度45%～55%)の場所に保管し、製品、包装に水、溶剤、ガスなどをかけないで下さい。

⚠ 注意

取扱を誤った場合に、ケガや物的損傷を負う可能性があります。

フレームの仕様

- ミーガードフレーム(ABS製) 耐熱温度 約90℃
- 可動バー(PP製) 耐熱温度 約90℃
- 重 量：約20グラム(Mフィルム付き)、約23グラム(Lフィルム付き)

フィルムの仕様

- MEG-1F(M) 【ハーフフェイス】:w247mm×h123mm×t0.13mm
- MEG-1F(L) 【フルフェイス】:w248mm×h209mm×t0.13mm
- MEG-SC(M) 【ハーフフェイス】:w247mm×h123mm×t0.16mm

商 品 名	品 番	販売単位	定価(税別)	JANコード
ミーガードフレーム ブルー	MEG-1-B	1本	1,600円	4580358030011
ミーガードフレーム レッド	MEG-1-R	1本	1,600円	4580358030028
ミーガードフレーム ピンク	MEG-1-P	1本	1,600円	4580358030158
ミーガードフレーム ライトブルー	MEG-1-LB	1本	1,600円	4580358030165
ミーガードフレーム ライトグリーン	MEG-1-LG	1本	1,600円	4580358030172
ミーガードフレーム シャンパンゴールド	MEG-1-CG	1本	1,600円	4580358030189
ミーガードフレーム オレンジ	MEG-1-O	1本	1,600円	4580358030035
ミーガードフレーム イエロー	MEG-1-Y	1本	1,600円	4580358030042
ミーガードフレーム プリズムラベンダー	MEG-1-PL	1本	1,600円	4580358030196
ミーガードフレーム フレッシュグリーン	MEG-1-FG	1本	1,600円	4580358030202
ミーガードフレーム シルバークレイ	MEG-1-SG	1本	1,600円	4580358030219
ミーガードフレーム ガンメタリック	MEG-1-GM	1本	1,600円	4580358030226
ミーガードフレーム グリーン	MEG-1-G	1本	1,600円	4580358030233
ミーガードフレーム サクラ	MEG-1-S	1本	1,600円	4580358030240
ミーガード専用交換両面防曇フィルム Mサイズ	MEG-1F(M)	1/パック10枚入り	2,000円	4580358030059
ミーガード専用交換両面防曇フィルム Lサイズ	MEG-1F(L)	1/パック10枚入り	3,200円	4580358030066
ミーガード専用交換両面防曇フィルム(スーパークリア)Mサイズ	MEG-SC(M)	1/パック10枚入り	4,800円	4580358030073

※製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

MADE IN JAPAN

発売元



MITAS
Medical Instruments, Technologies, And Services

株式会社 ミタス

〒918-8556 福井県福井市問屋町4丁目901 TEL 0776-24-0500 FAX 0776-24-0021 www.mitas-inc.co.jp