

すべてが、
ハイグレード。

MeGUARD PRO

HIGH QUALITY FACE GUARD FOR PROFESSIONALS

進化する医療の現場に、特別なミーガードを。

医療現場のハードな環境において、プロに認められてきた 高品質フェースガード【MeGUARD】。
その【MeGUARD】に、質感・デザイン・快適性・耐久性をさらに磨き上げた“最上位モデル”が登場。
一歩先を行くクオリティで、より質の高い医療をサポートいたします。

進化する医療の現場に、特別なミーガードを。

MeGUARD PRO

HIGH QUALITY FACE GUARD FOR PROFESSIONALS

装着方法
こちらからご覧いただけます



フィルム交換式

使い捨てタイプだから、いつも清潔・快適な使い心地をお約束します。

はね上げ可能

フィルムが邪魔なとき、上にはねあげることができます。


眼鏡との併用可能

カチューシャ式なので眼鏡をかけた状態でも可能で鼻への負担もありません。


かんたん交換

フィルムの着脱はとても簡単で、調節もラクに行えます。


MeGUARD PRO 本体に専用フィルムを装着して、ご利用ください。

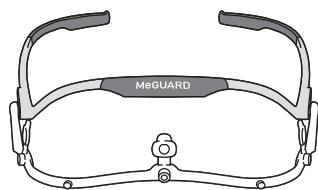

MeGUARD PRO 本体

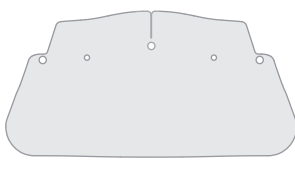


ミーガード専用フィルム(別売)

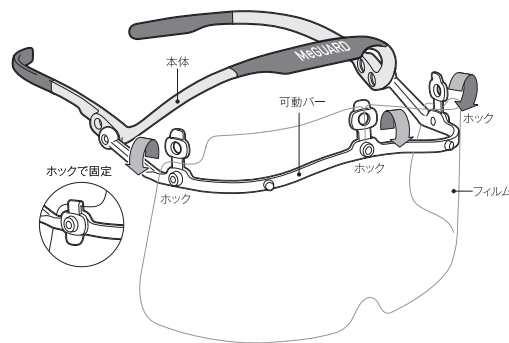

可動バーの位置を調整できます。

- MeGUARD PROは本体の穴と、可動バーのピン、ネジによって連結されています。
- 取り外しは、ネジをドライバーではずした上で、双方の連結部の元を持ってゆっくり引き離してください。
- 取り付けは、本体の左右にある穴から使いやすい位置を選び、可動バーのピンを本体の穴にまっすぐに押し込んで、ドライバーでネジを締めてください。
- 注意: 取り付けは、必ず左右の穴の位置を合わせてください。

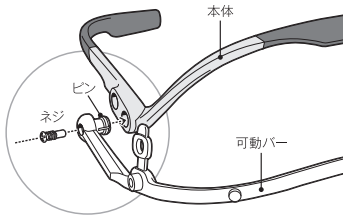

正しく装着してご利用ください。

- 本体の前部分を、額の上部を抑えるようにして、装着してください。
- フィルムが不必要なときは、上にはねあげることができます。



額の上部を抑えるように、装着してください。



⚠ 使用上の注意

- ①防曇フィルム(MEG-1F)には片面に保護シートが貼られています。本体に取り付ける際には保護シートが貼られた状態のまま装着して下さい。また、必ず保護シートを取り外してご使用下さい。
※このフィルムは使い捨てです。汚れたフィルムや複数回の使用を避け、毎回新しいものにお取り替え下さい。
- ②ご使用者による改造・修理は行わないで下さい。

⚠ 取扱上の注意

- ①本体は、ぬるま湯に薄めた中性洗剤で手洗いし、水洗いの後に柔らかい布、あるいは柔らかい紙でふき取して下さい。
- ②本体の消毒には、無水エタノール、又は、次亜塩素酸ナトリウムを6%程度に薄めた溶液をご使用下さい。ガス、熱(煮沸)、及び有機溶剤等、不適合な薬品の使用は、製品の劣化、破損の原因となりますので使用しないで下さい。

⚠ 本製品は滅菌されていません。

MeGUARD PRO 本体 の製品環境安全情報

- 【有害性情報】 本製品は通常の取り扱い方法(本来の使用状態)に於いて、健康に害を及ぼすことはありません。
- 【廃棄上の注意】 廃掃法及び地方自治体の条例に従い廃棄して下さい。焼却処分する場合は、廃掃法、大気汚染防止法、水質汚染防止法に従って処理して下さい。
- 【保管上の注意】 直射日光を避け、推奨(気温15℃~20℃、湿度45%~55%)の場所に保管し、製品、包装に水、溶剤、ガスなどをかけないで下さい。

MeGUARD PRO 本体の仕様

- MeGUARD PRO 本体(ネジ、装飾、樹脂部を除く): チタン
- 装飾部: 合金・樹脂 [樹脂部の耐熱温度 約70℃]
- 可動バー: ポリプロピレン [耐熱温度 約90℃]
- 重量: 約33.0g(Mフィルム付き)・約36.5g(Lフィルム付き)

フィルムの仕様

- MEG-1F(M) 【ハーフフェイス】: w247mm×h123mm×t0.13mm
- MEG-1F(L) 【フルフェイス】: w248mm×h209mm×t0.13mm
- MEG-SC(M) 【ハーフフェイス】: w247mm×h123mm×t0.16mm

商品名	品番	販売単位	定価(税別)	JANコード
MeGUARD PRO (Midnight)	MEGP-MB	1本	32,000円	4580358030509
MeGUARD PRO (Cardinal Red)	MEGP-CR	1本	32,000円	4580358030516
MeGUARD PRO (Titanium Gray)	MEGP-TG	1本	32,000円	4580358030523

MeGUARD専用 交換両面防曇フィルム Mサイズ	MEG-1F(M)	1パック 10枚入	2,000円	4580358030059
MeGUARD専用 交換両面防曇フィルム Lサイズ	MEG-1F(L)	1パック 10枚入	3,200円	4580358030066
MeGUARD専用 交換フィルム(スーパークリア) Mサイズ	MEG-SC(M)	1パック 10枚入	4,800円	4580358030073

※製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

MADE IN JAPAN

発売元



MITAS
Medical Instruments, Technology, And Services

株式会社 ミタス

〒918-8556 福井県福井市問屋町4丁目901 TEL 0776-24-0500 FAX 0776-24-0021 www.mitas-inc.co.jp